


MONTAGE ANLEITUNG | MOUNTING INSTRUCTION

93063 AKJA WINDSCHUTZVERDECK | AKJA WINDSHIELD COVER



Befestigungslaschen montieren | Mounting of fixing plates

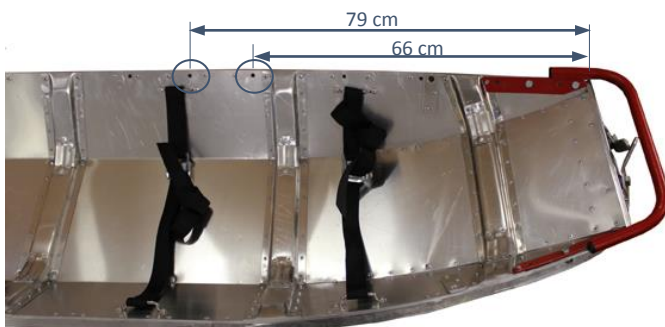

Falls bei Ihrem Akja (z.B. Akja Combi) die Befestigungslöcher nicht vorhanden sind, müssen diese mit einem \varnothing 7mm Metallbohrer gebohrt werden.

In case your Akja model doesn't have the fixing holes, please drill them with a \varnothing 7mm driller.

Schlaufe über Bayonettverschluss ziehen | *Pull the strap over the bajonet locking*



Einziehen des Glasfaserstabs | *Insert glas fibre bar (if necessary)*



Befestigen der Verdeckbügel | *Attach aluminum bows*



Befestigen der Reepschnur | *Attach cord*



Schraube einsetzen und Windschutzverdeck mit Schlaufe spannen | *Insert srew (6x35mm) and clamp windshield cover by fixing the strap*

