
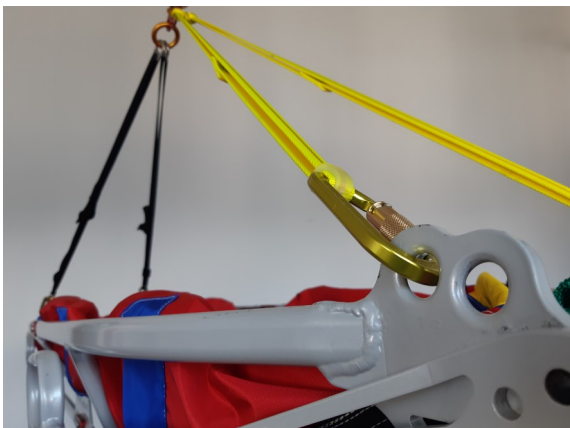


## 2-fach Verstellbare Aufhängung TYRAL

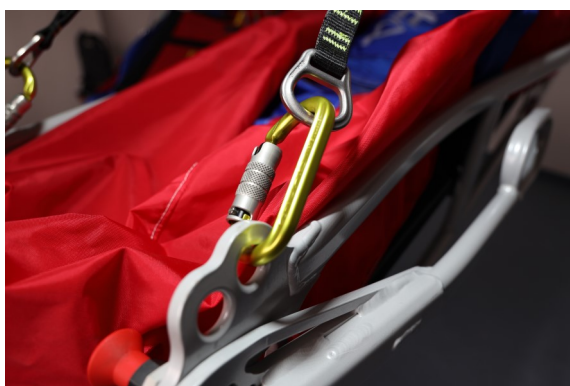

**Verstellbare Aufhängung** für TYRAL Gebirgstrage.

Verstellbare Aufhängung damit Patient möglichst horizontal in der Trage liegt.

Schlingen im Beinbereich können von 30cm bis 150cm verstellt werden.

Schlingen Kopfbereich haben eine fixe Länge von 100cm,

Die Aufhängung wird an den 4 Anschlagpunkten Kopf/ Fußbereich mittels Twistlock Karabinern eingehängt. Seil wird mittels Riggerplatte und Karabiner befestigt.

Die Aufhängung kann werkzeuglos von einer horizontalen zu einer vertikalen Aufhängung umgebaut werden.

Dafür einfach die beiden gelben Bandschlingen aus dem OpenRing ausfädeln und für ein vertikales ablassen nutzen.

Alle Einzelteile nach EN 354, EN 566 und EN 795-B zertifiziert.

Art. Nr.	<b>93258</b>
Abmessung	Länge Kopf: 100 mm Länge Fußbereich: 30-150mm
Gewicht	Gesamt: 1,4 kg
Anmerkungen	Wird mit TYRbag Tasche geliefert.