

MONTAGE ANLEITUNG

93262 | 93263 Gleitski-Modul TYRAL

Die Gleitski-Module wurden entwickelt, um den Transport der Gebirgstrage in weglosen Geländearten (Schnee, Wald und Wiesenhänge) zu erleichtern.

Durch die baugleiche und symmetrische Form ist ein Verwechseln bei der Montage ausgeschlossen.

Die Module werden **werkzeuglos** mittels **Rohrklappsplint** an der Trage befestigt.

Ein Umbau beim Wechsel zwischen **Rad- und Ski-Betrieb** ist nicht notwendig – die Gleitski-Module können an der Trage verbleiben.

1. TYRAL Trage auf einer stabilen und ebenen Fläche so umdrehen, dass die Kufen nach oben zeigen und die Trage sicher liegt.
2. Gleitski-Module an der vorgesehenen Position ansetzen.
3. Die Befestigung erfolgt, indem die Gleitski-Module jeweils vor und hinter einer Längsstrebe mit Rohrklappsplinten gesichert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Splinte vollständig eingesteckt und verriegelt sind, sodass ein Herausfallen verhindert wird.
4. Sitz der Verbindung überprüfen.

