

MONTAGE ANLEITUNG | MOUNTING INSTRUCTION

93076 SCHUTZSACK VERLETZTENTRAGE | *INJURED BAG STRETCHER*




1. Schutzsack im Kopfbereich über Trage ziehen und grüne Gurte durch Öffnungen durchschlaufen.
Put injured bag over upper lying area and the two green belts through the slots.



2. Klettverschluß auf Rückseite schließen, achten sie drauf daß der Verstellzylinder frei bleibt.
Close the Velcro fastener on the back, making sure that the adjustment cylinder remains free.



3. Die zwei Gurte an der Unterseite durchschlaufen, festziehen und auf Klettband fixieren.
Loop through the two straps on the underside, tighten and secure on the Velcro tape.

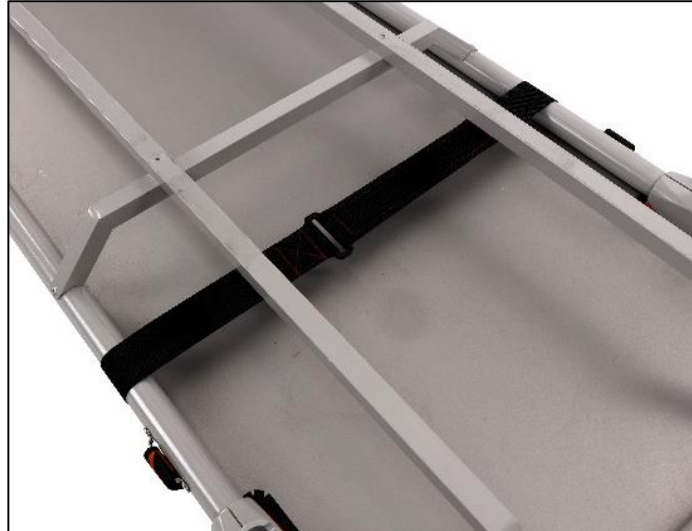

4. Durch den seitlichen Zugang am Schutzsack kann die Verstellung der Liegefläche vorgenommen werden.
The leaning surface can be adjusted via the side access on the protective cover.



5. Eine Verstellung der Liegefläche erfolgt durch Drücken des flächenbündigen Druckknopfes an der Liegefläche. Durch die pneumatische Unterstützung ist das Aufrichten ohne großen Kraftaufwand möglich.

An adjustment of the lying surface is made by pressing the flush-mounted button on the lying surface. Thanks to pneumatic assistance, raising the surface is possible without much effort

